

# Prev-Kel

Gel de silicone para redução de cicatrizes

**Myralis**  
pharma

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### O que é Prev - Kel?

PREV - KEL é um gel de silicone transparente e autossicante que mantém o equilíbrio hídrico da pele, facilitando a regeneração de cicatrizes causadas por cirurgias, queimaduras ou traumas.

### Quais as vantagens do uso de Prev - Kel?

PREV - KEL promove redução de cicatrizes hipertróficas e queloides, alívio do prurido e desconforto relacionados ao processo cicatricial e normalização da pigmentação da cicatriz.

### Qual a composição de Prev - Kel?

Polisiloxanos e dióxido de silicone.

### Quando utilizar Prev - Kel?

PREV - KEL deve ser utilizado para redução de cicatrizes, quando o ferimento estiver completamente seco ou após a remoção das suturas (pontos). PREV - KEL também pode ser utilizado para prevenção de formação de queloides em cirurgias, traumas e queimaduras.

### Quem pode utilizar Prev - Kel?

Crianças e adultos, mesmo com pele sensível.

### Como utilizar Prev - Kel?

Limpe a área a ser tratada com água e sabão neutro, secando-a em seguida. Aplique a camada mais fina possível de PREV - KEL, cobrindo toda a área afetada, duas vezes por dia.

PREV - KEL desaparecerá na pele após 4-5 minutos. Evite o contato com roupas ou cosméticos até que ocorra a completa secagem do produto, de modo a evitar manchas.

Caso observe resíduos de PREV - KEL em 4-5 minutos, retire o excesso de produto aplicado e deixe o restante secar na pele normalmente.

Para efeito máximo, o gel de PREV - KEL deve ter 24 horas de contato com a pele.

### Por quanto tempo deve-se utilizar Prev - Kel?

Recomenda-se a utilização mínima por dois meses. Benefícios adicionais podem ser atingidos com o uso prolongado do produto.

O tempo mínimo recomendado de tratamento é de 60-90 dias.

Para cicatrizes maiores e mais velhas, pode ser recomendado o uso continuado e por mais tempo se a melhora for vista após os 90 dias iniciais.

### Quais as precauções para utilização de Prev - Kel?

Não utilizar em feridas abertas ou incisões recentes.

Não aplicar em mucosas (nariz, boca ou perto dos olhos).

Não aplicar sobre a mesma área após utilização de antibióticos tópicos ou outros produtos para a pele.

Não utilizar em caso de solução de continuidade da pele.

### Quais os efeitos indesejados de Prev - Kel?

Raramente poderá ocorrer vermelhidão, dor ou irritação na pele. Caso isto ocorra, consulte seu médico.

### Como Prev - Kel deve ser armazenado?

Mantenha fora do alcance das crianças e em temperatura inferior a 25° C.

**Myralis**  
pharma

### Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO

M.S.nº 80214950005 - Farm. Resp.: Dr. Carlos Alexandre de Oliveira Ferrari - CRF-SP nº 39.554

### Ativus Farmacêutica Ltda.

Rua Fonte Mécia 2050 - Cx. Postal 489 - CEP 13273-900 - Valinhos - SP - CNPJ: 64.088.172/0001-41  
Indústria Brasileira

SAC 0800 7712010

cod.12852-rev 7.11 (C)